



making work easy



- FAQ - Deutsch
- FAQ - English
- FAQ - Français
- FAQ - Italiano
- FAQ - Español
- FAQ - Português
- FAQ - Türkçe
- FAQ - Русский
- FAQ - Polski
- FAQ - Dansk
- FAQ - 中文
- FAQ - 日本語
- FAQ - 한국어
- FAQ - اللغة العربية



WAXLECTRIC I + II

FAQ - frequently asked questions

FAQ - 한국어



장의 표시 사항은 인터넷으로 전체 사용설명서를 참조하십시오.

고장	원인	배제
디스플레이도 안되고 작동도 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 조종장치가 켜지지 않다. 전력공급이 중단되었다. 플러그가 조종장치에 완전히 들어가 꺾히지 않았다. 조종장치가 고장이다. 변압기가 고장이다. 칼끝에서 단전이 일어났다. 	<ul style="list-style-type: none"> 조종장치는 스위치 A로 켕니다. 전력공급 상태를 점검해보고 필요하면 다시 복구한다. 플러그가 분명히 찰칵 소리가 날 정도로 물려 들어갈 때까지 꺾는다. 서비스를 통해 교체한다. 예비부품으로 교체한다 (예비부품목록 참조). 칼끝과 손잡이를 세척한다 (불어낸다). 칼끝을 교체한다. 가열 손잡이 고장 -> 예비부품으로 교체한다 (예비부품 목록 참조).
기기는 작동하는데 칼끝에 온도가 오르지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 칼끝이 제대로 돌려 끼워져 있지 않다. 칼끝과 손잡이 사이 접촉이 오염되었다. 칼끝이 고장이다. 핸드피스 케이블 플러그가 조종장치에 제대로 꺾히지 않았다. 핸드피스 케이블의 플러그가 부식되었다. 	<ul style="list-style-type: none"> 칼끝을 돌리면서 단단하게 조인다. 접촉상태를 세척한다 (불어낸다). O-링을 갈아준다 (예비부품 목록 참조). 새 칼끝으로 갈아 끼다 (제 13 번/ 부속품 참조). 핸드피스 케이블 플러그가 분명히 찰칵 소리가 날 정도로 물려 들어갈 때까지 꺾는다. 플러그를 다시 꺾는다, 경우에 따라서는 접촉상태를 세척한다.
칼끝 온도가 원하는 만큼 오르지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 정품 변압기를 사용하지 않기 때문에 칼끝의 전력공급이 잘못되었다. 	<ul style="list-style-type: none"> 정품 변압기를 사용한다.
조절치저장기능이 안된다.	<ul style="list-style-type: none"> 저장장치 구성요소가 고장났다. 	<ul style="list-style-type: none"> 기구를 수리하도록 조치.

고장	원인	배제
P-키를 누를때 항상 동일한 온도가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> 모든 온도저장기에 동일한 온도가 저장되었다. 	<ul style="list-style-type: none"> 온도저장기에 상이한 온도들을 저장한다 (보기 5.6 장 참조).